

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Средняя школа Вулканного городского поселения"**



**График**

**работы рециркуляторов.**

№ п/п	Марка рециркулятора	Производительность, м <sup>3</sup>	Помещение где установлен	Объём помещения, м <sup>3</sup>	Время включения	Время выключения	Примечания
1.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №3	145	08-45	16-00	
2.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №4	145	08-45	17-30	
3.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №5	145	08-45	16-00	
4.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №9	146	08-45	15-30	
5.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №10	145	08-45	17-30	

6.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №11	146	08-45	17-30	
7.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №12	145	08-45	17-30	
8.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №13	199	08-45	12-00	
9.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №14	243	*		По времени проведения занятий
10.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №15	152	**		По времени проведения занятий
11.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №17	215	08-45	16-00	
12.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №18	109	08-45	15-30	
13.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №19	148	08-45	15-30	
14.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №20	146	08-45	15-30	
15.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №21	148	08-45	15-30	
16.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №22	148	08-45	15-30	
17.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Учебный кабинет №23	199	***		По времени проведения занятий
18.	ОРУБп-3-3-«КРОНТ	100	Приёмная	51	08-45	18-00	

19.	РБОВ 911-«МСК»	100	Учебный кабинет №8	83	****		По времени проведения занятий
20.	РБОВ 911-«МСК»	100	Рекреация 1 этаж	373	08-45	18-00	
21.	РБОВ 911-«МСК»	100	Рекреация 2 этаж	551	08-45	18-00	
22.	РБОВ 911-«МСК»	100	Рекреация 3 этаж	343	08-45	18-00	
23.	РБОВ 911-«МСК»	100	Медицинский кабинет	57	08-45	16-00	
24.	РБ-18-«Я-ФП»-01	90	Учебный кабинет №6	266	**		По времени проведения занятий
25.	РБ-18-«Я-ФП»-01	90	Холл	199	08-30	19-00	
26.	РБ-18-«Я-ФП»-01	90	Актовый зал	792	08-45	18-00	
27.	РБ-18-«Я-ФП»-01	90	Обеденный зал	430	08-45	17-00	
28.	ОБНР-2*8-01 КАМА	14	Кабинет логоведа	57	10-00	18-00	
29.	ОБНР-2*8-01 КАМА	14	Процедурный кабинет	21	08-45	16-00	

\* Понедельник 09-00-12-30; вторник 11-30-15-30; среда 09-00-12-30; пятница 10-30-13-30

\*\* Понедельник 13-00-16-30; вторник 13-00-16-30; четверг 12-30-15-30; пятница 14-20-16-30

\*\*\* Понедельник 11-30-14-30; вторник 10-30-14-30; среда 11-30-15-30; четверг 09-30-13-30; пятница 12-30-15-30


\*\*\*\* Понедельник 09-30-14-30; вторник 08-45-10-30; четверг 08-45-13-30; 08-45-10-30

Примечание.

Выписка из инструкции по эксплуатации ОРУБп-3-3-«КРОНТ» утверждённая приказом Росздравнадзора от 16.02.2009 года №1124 ПР/09.

В присутствии людей рециркулятор может работать непрерывно в течение всего времени, необходимого для поддержания уровня микробной обсеменённости воздуха на уровне нормативных показателей, в зависимости от функциональных требований к помещению и количества находящихся в нем людей. Рециркулятор ОРУБ - 3 - 3 - «КРОНТ» рекомендуется использовать в помещениях объемом до 100 м<sup>3</sup> при нахождении в нем не более 3 -х человек. При этом обеспечивается предотвращение нарастания уровня микробной обсеменённости воздуха. При нахождении в помещении более 3 -х человек количество рециркуляторов должно быть увеличено, исходя из расчета: один рециркулятор - на 3 человека. При беззараживании воздуха в помещении большего объема, количество рециркуляторов должно быть увеличено из расчета 1 рециркулятор на 100 м<sup>3</sup>.

Начальник хозяйственного отдела

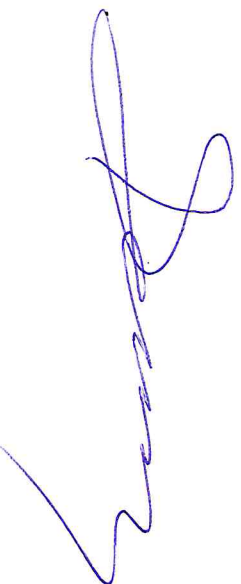

А.А. Каблукон